

HauTa – das Hauttagebuch


Kurzanleitung

1. App starten
2. Profil anlegen / auswählen
3. Hautbild anlegen / auswählen
4. Körperbereich auswählen
5. Stelle gedrückt halten
6. Foto erfassen:
 - Schablone auf die Stelle legen
 - Links und rechts die schwarzen Balken mit Kamerarand ausrichten
 - Warten, bis die Kamera sich scharf stellt (oder Abstand ändern)
 - Auf gute Beleuchtung achten, Blitzlicht vermeiden
7. Kommentar erfassen (optional)
8. Bild auf das innere Quadrat zuschneiden und speichern


Am einfachsten ist dies, wenn Dir jemand dabei hilft einmal den Körper zu erfassen.
Um weitere Fotos zu bestehenden Stellen zu erfassen, einfach wie oben vorgehen und „neuer Fleck“ verneinen oder in der Listenansicht ergänzen.

Weitere Videoanleitungen findest Du unter: <https://hauta.andreasnannen.de/anleitung>


1. Papier und Pappe grob zuschneiden

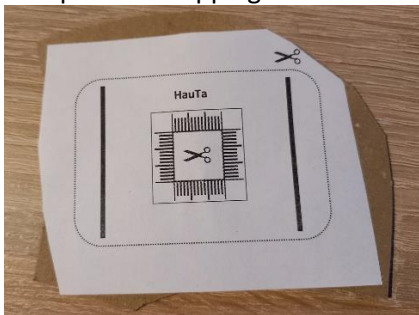

2. Innenbereiche ausschneiden

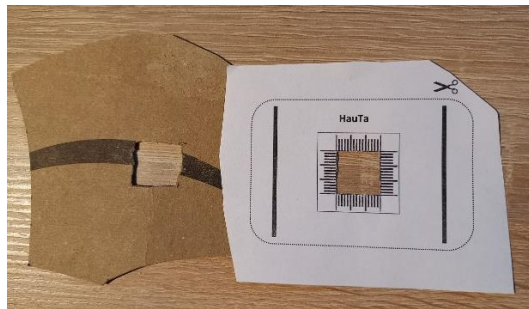

3. Aufeinander kleben, auf Mitte achten

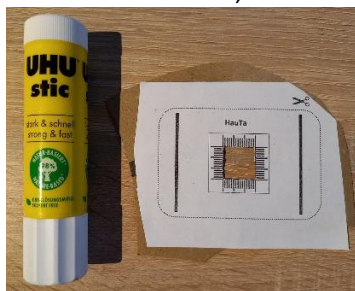

4. Rand zuschneiden

